

beyond[®] Whitening

POLUS[®] ビヨンドホワイトニングライト

- 電源 100~240V周波数 50Hz/60Hz
- 出力電流 150VA
- 電源ヒューズ T2.5AL250V×2
- 光源波長域 ハロゲン 480-520nm
LED 400-500nm
- 寸法 (高さ)収納時1200mm、最高1400mm
(幅)390mm
(奥行)390mm、最大アーム伸長域950mm
- 重量 約21kg

LEDキュアリングライト

- 消費電力 9W
- キュアリングライト時出力 800mw/cm²
- 単数歯ホワイトニング時出力 750mw/cm²
- デバイス光波長域 400~500nm

医療機器製造販売届出番号
13B3X10209000005



POLUS[®]
Advanced

with
Ultrasonic Technology

世界初!
超音波
ホワイトニング

ビヨンドは常に「革新」を続けます

beyond[®] Whitening

JBA


株式会社JBA

〒145-0071 東京都大田区田園調布2-11-12

TEL: 03-5755-5505 FAX: 03-5755-5545


<http://www.jbainc.co.jp>

進化し続ける ホワイトニングライト

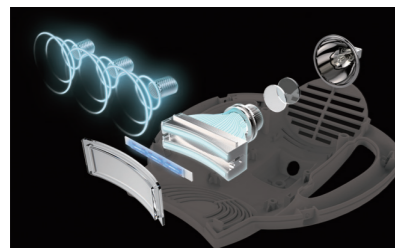

世界初!
超音波ホワイトニング

従来の方法より
約 **30~50%**
効果
アップ

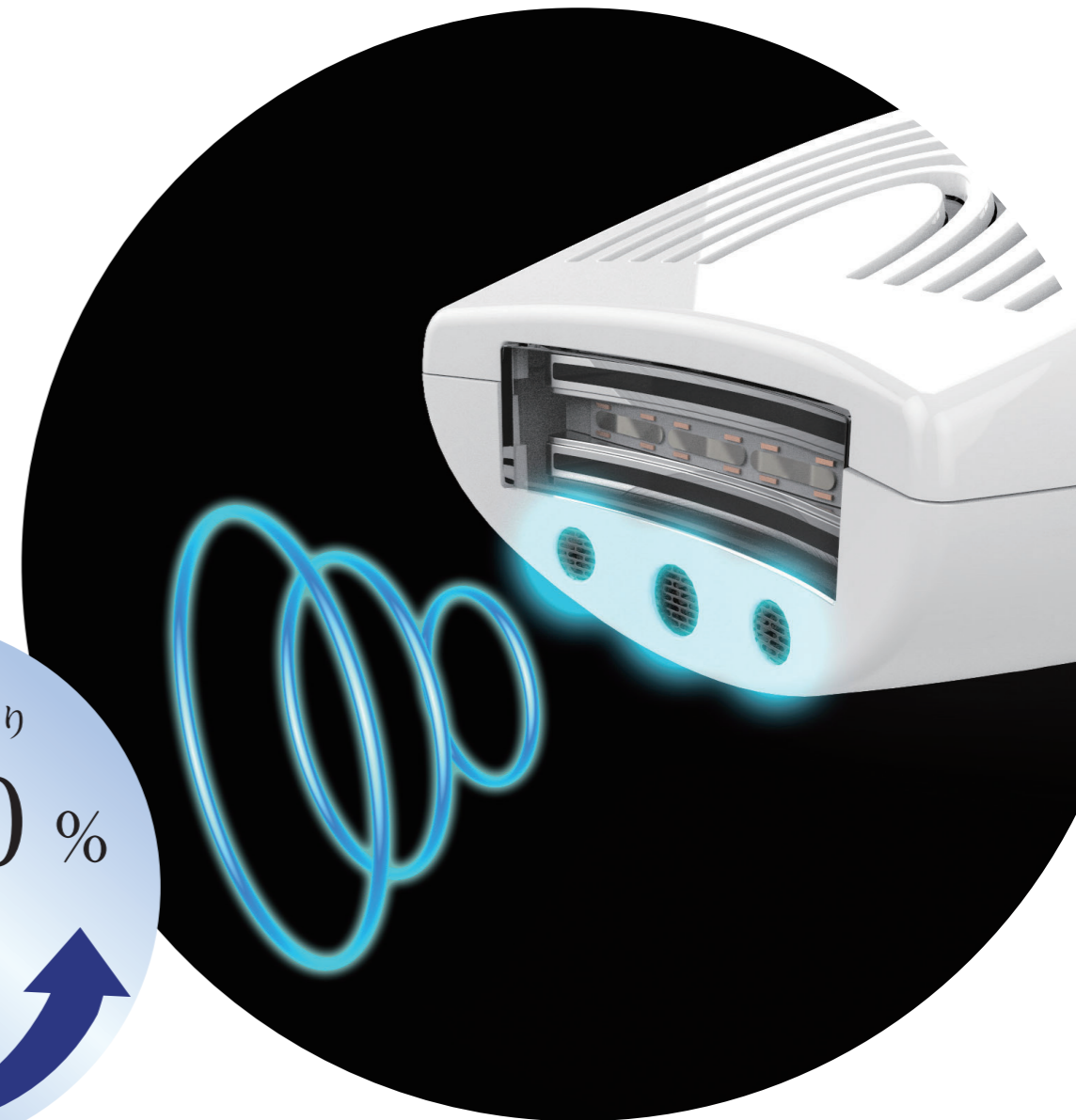

ますます強力に

世界初。ハロゲン光+LED光
<Light Bridge Technology>にUltrasonic Technologyを加え、ますます効果的なホワイトニングを実現します。

より安全に

Beyond Polusの照射光から出る光は15万本のファイバーによって歯牙や歯肉に有害な熱や紫外線(UV)をコントロールし、より安全なホワイトニングを実現します。

より快適に

- ① 可動域360°のラジアルアームと電動で上下するライトヘッドは施術部位に確実にアプローチでき、より快適なホワイトニングを実現します。
- ② 視認性に優れたタッチユーザーインターフェイス(TUI)コントロールパネルで操作も簡単です。
- ③ ワイヤレスリモコンは一時停止、残り時間の通知、ナースコールによる呼び出しが可能で、術者が席を離れていても安心です。
- ④ 付属のLEDキュアリングライトは、単一歯ホワイトニング用として使用できます。



① 可動域360度のラジアルアーム
② 視認性に優れたTUIコントロールパネル
③ ワイヤレスリモコン
④ LEDキュアリングライト

★シェードの改善度

	5分	15分	30分	45分	60分
①ジェルのみ	3.8	7.3	9.3	11.5	13.2
②ジェル+ライト	4.7	9.2	11.6	13.7	17.5
③ジェル+ライト+超音波	4.4	11.8	17.6	21.3	23.5

★過酸化水素浸透度(μg/mg)

	5分	10分	15分	30分	45分	60分
①ジェルのみ	0.3	0.9	1.2	4.6	6.6	8.6
②ジェル+ライト	1.4	2.2	5.4	6.8	9.3	10.2
③ジェル+ライト+超音波	3.2	4.6	5.5	6.9	9.4	10.2