

歯科印象トレー用レジン
(一般医療機器)
届出番号:27B2X00004000002

進化したレプリカシリーズ 歯科印象トレー用レジン レプリカトレー

REPLICA TRAY



レジン臭軽減
(当社比)



色調:ピンク アイボリー クリア

あつたらいいな

個人トレーの簡単・作り方

POINT

旧義歯を活用した作製方法



亀水化学工業株式会社

〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町 17-16

TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299

お問い合わせ ☎ 0120-267-720


<https://kamemizu.co.jp>

E-mail:info@kamemizu.co.jp

旧義歯形態情報

を活用した個人トレー

研磨面の形態が再現できます

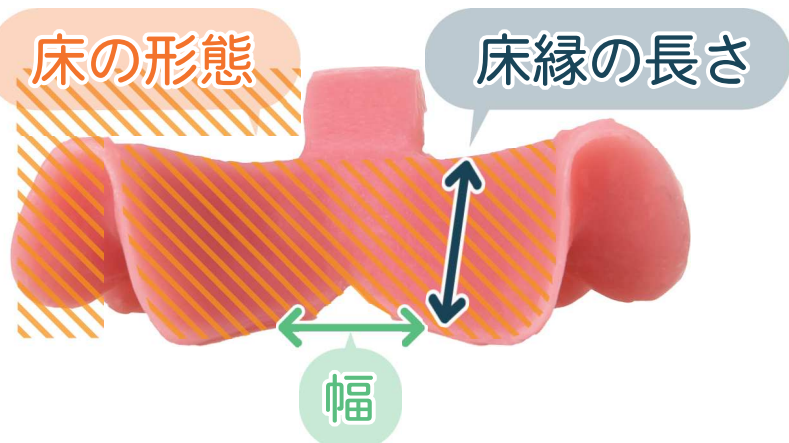

石膏模型の作製不要!!

患者さんから印象を採る必要がありません

個人トレーの作製方法

STEP
01



旧義歯の印象

アルギン酸塩印象材練和後、旧義歯に印象材をあらかじめ床内面全体に手指でこすりつけるように塗布します。

STEP
02




埋没

粘膜面を下にして埋没します。印象材硬化後、余剰な印象材を取り除き、旧義歯を取り出します。

簡単
作製

高い
精度

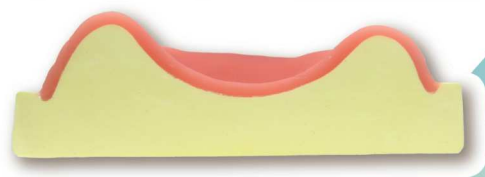

STEP
03



レジン混和・流し込み

計量したレプリカトレー粉と液を混和後、流し込んでください。(硬化時間: 混和開始より約10分)

流動性が良く、型の細部まで容易に流し込めます。

STEP
04



持ち手作製・取付

流し込んだレジンの流動性が鈍くなった後に、余ったもち状レジンで個人トレーの持ち手を作製し、流し込んだレジンと接続します。

完成

