


義歯洗浄剤

歯科医院専売品

# ラバラックムース

歯科医院・訪問歯科・介護施設用  
家庭用

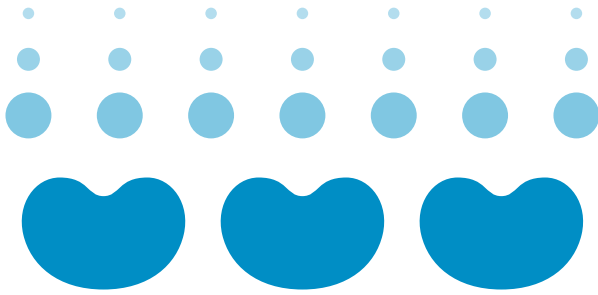

ブラッシングしないので**楽!**

義歯を  
傷つける心配が  
ありません

短時間清掃で**楽!**

パワーアップした  
泡洗浄で  
作業時間  
を短縮!

介護施設  
院内用



600mL

家庭用

プッシュタイプで**楽!**

どこでも  
だれでも  
**カンタン!**  
入れ歯洗浄!!



5 L

ラバラックムース  
5L (詰替え用)

※専用容器に詰替えてご使用下さい。



200mL

## 高齢者に多い誤嚥性肺炎予防は口腔ケアから

食後、毎回洗浄をおこなっていただくのが基本です。  
それが難しい場合でも、1日1回は洗浄をおこなきましょう。



義歯などについた傷は、カビ(カンジダ菌)や細菌の温床となる!!

義歯を長い間不衛生にしておくとニオイだけでなく、義歯性口内炎や歯肉炎になる可能性があります。  
又、口腔内のカビ(カンジダ菌)や細菌が原因で、誤嚥性肺炎を引き起こす場合もあります。  
義歯を清潔に保ち健康で快適な生活を送るには正しい義歯ケアが必要です。

ブラッシングを必要としないため、義歯などを傷つける心配がありません。



次亜塩素酸ナトリウム3%を安定維持

# 次亜塩素酸ナトリウムによる化学的洗浄でデンチャーケア

## 目に見えない汚れを洗浄

多孔性レジン床は雑菌の温床

- ◎抗菌効果が高い次亜塩素酸ナトリウム3%配合
- ◎防錆剤配合で金属も安心
- ◎ムースをかけるだけでカンタン除菌・脱臭・洗浄

## 目に見える汚れを洗浄

ステインや酸化した金属床の黒ずみ

- ◎危険性の回避 ⇒ 飛散や誤飲防止
- ◎洗浄時間の短縮 ⇒ 約5分の作業で、つけ置き不要

## カンタン3ステップで、デンチャーケア

食後、毎回 洗浄をおこなっていただくのが基本です。


ムースの泡がはじける時に、汚れを浮き上がらせて落とします。

Step 1



- ・容器に洗浄物を入れた後、ムースで洗浄物を覆います。
- ※お手持ちの洗浄用容器をご使用ください。

Step 2

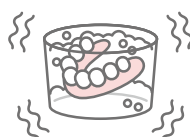

- ・容器を数回振り、洗浄物とムースをなじませ3~5分置きます。

Step 3



- ・流水下で20秒すぎます。洗浄物とケースのW洗浄完了。

### ご注意



約60°Cのお湯

長期間使用しないと界面活性剤が固まりムースの出が悪くなる場合があります。ムースが出にくい場合は約60°Cのお湯に3分間ほどつけてからご使用ください。

### ラバラックムース(介護施設・院内用)

【容量】 600mL / 5L

【医院価格】 600mL 3,800円(税込 4,180円)  
5L 16,000円(税込17,600円)

### ラバラックムース家庭用

【容量】 200mL

【医院価格】 1,270円(税込1,397円)  
【患者価格】 1,500円(税込1,650円)

**成分** 次亜塩素酸ナトリウム 3%  
界面活性剤 5% ※環境にやさしい界面活性剤を使用  
防錆安定剤

**性状** アルカリ性 pH約13

**用途** レジン床義歯・金属床義歯・脱離冠・脱離ブリッジ・矯正用リテーナー・ナイトガード・スプリント・マウスガード・テンポラリーク라운・テンポラリーブリッジ などの洗浄  
※実際のご使用には各材料製造元へのご確認をお願いいたします。

**特長**

- ラバラックムースは義歯や補綴物などに付着したプラーク、タンパク性被膜やヤニ、茶シブなどを短時間で強力に溶解・脱臭します。
- 次亜塩素酸ナトリウム3%を安定維持することにより、ムース洗浄を可能にし、洗浄時間を短縮します。
- 防錆剤を配合していますので金属にも安心して使用できます。

### デントクリアカップ

手を汚さずに  
洗浄ができます



【医院価格】 425円(税込468円)  
【患者価格】 500円(税込550円)

種類:ピンク・ブルー

### ラバラックD

超音波洗浄器用義歯洗浄液  
ガンコな着色汚れには  
ラバラックDがおすすめ

【医院価格】 1.2L 4,500円(税込 4,950円)  
5L 13,500円(税込14,850円)



## SD サンデンタル株式会社

〈本社〉〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号 Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690  
〈東京営業所〉〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号 Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090  
〈福岡営業所〉〒812-0008 福岡市博多区東光1丁目3番8号 Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339  
<http://www.sundental.jp>

■本製品のお買い求め・ご相談は