



可搬型手術用顕微鏡  
歯科用マイクロスコープ

エルタニス

エルタニス

*M spec.*

Dental Microscope Eltanis series

# 自由自在な操作性。 医科用分野から進化した 手術用顕微鏡

日本の医療用マイクロスコープ製造メーカーの  
三鷹光器(株)が歯科用として開発した「エルタニス」。  
高い操作性、信頼の光学系はそのままに  
歯科用としてダウンサイズしました。

鏡筒部



200mm  
600mm

200から600mmまでの  
ワイドレンジの調整が可能

特殊な光路を採用し、顕微鏡筐体の厚みを極力抑えた設計です。  
これによりハンドインスツルメントや、ホース・コードのついている  
インスツルメントのワーキングスペースを充分に確保でき、  
治療の妨げとなりません。  
さらに長焦点フォーカス位に於いては、立位での治療や手術、  
またオプションのカメラなどを装着して  
オブザベーションカメラとしても使用することができます。



軽く滑らかな操作性

優れたカウンターバランスと6箇所すべての軸の滑らかな動きが、治療導入前の大きな動きから、  
微細な位置調整に至るまで、軽く滑らかな動きで対応できます。

ハンドル  
自在なコントロール


ハンドグリップにはズームとフォーカスを動かすスイッチと、6軸ブレーキ解除・3軸ブレーキ解除スイッチをそれぞれ配置しています。6軸ブレーキを解除すると、顕微鏡ヘッドとスタンドのブレーキがすべて解除され、任意の場所や角度に顕微鏡ヘッドを動かせます。3軸ブレーキ解除をすると、顕微鏡の角度は動かさずにスタンドのみ動きます。一度角度を決めた顕微鏡ヘッドを固定して、スムーズに上下・前後・左右に動かすことができます。



カウンターバランス

Eltanis

Mspec.

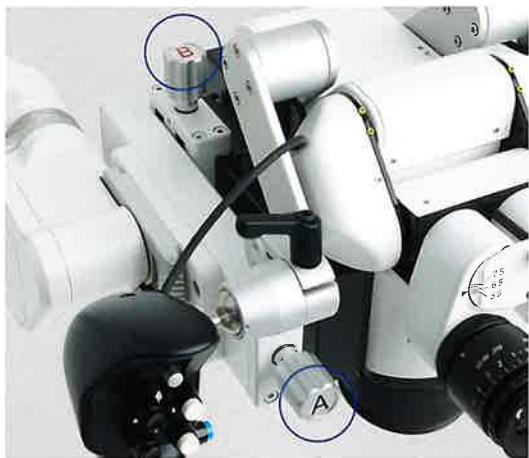

オプション装着時にAとBの二か所のノブにより、アームに対する顕微鏡ヘッドの位置関係を変更し、バランス調整ができます。

Cのノブで顕微鏡ヘッドとそのアーム全体のY軸方向の位置を変更し、バランス調整ができます。また、ズーム・フォーカスに加え、X-Y微動のスピードも任意に設定できます。



電動X軸微動イメージ図



電動Y軸微動イメージ図



左右のハンドルには、X-Y微動を操作するジョイスティックを装備しています。

デジタルカメラや側視鏡筒を付けても、A、B、C軸調整ノブにより、バランスをとることが可能です。



Vアーム内に「Vウエイト」を設置することにより、オプション装着時のアーム全体の動きをよりスムーズにします。



Eltanis *M* spec.  
High Motorized Microscope

エルタニス *M* spec. さらなる高みへ。  
Non-gravityにまた一歩近づく操作性。

ズーム・フォーカスに加え、  
電動X-Y微動も加わり、さらなる高い操作性を追求。  
専用フットコントローラーにより治療時のハンドフリー操作を可能にしました。

さらに、オプション装着時やハンドルの位置変更時などで、微妙にバランスが崩れても 3箇所のノブにより、術者が簡単に  
バランスをとることが可能になりました。また、新たに、Vアーム内に可動タイプの「Vウエイト」を加えたことにより、  
デジタルカメラや側視鏡筒などのオプションを装着した場合の、アームの動きをよりスムーズに、ストレスを感じずに操作することができます。